


# Зарядное устройство Phonak Charger Case Combi

Краткое руководство

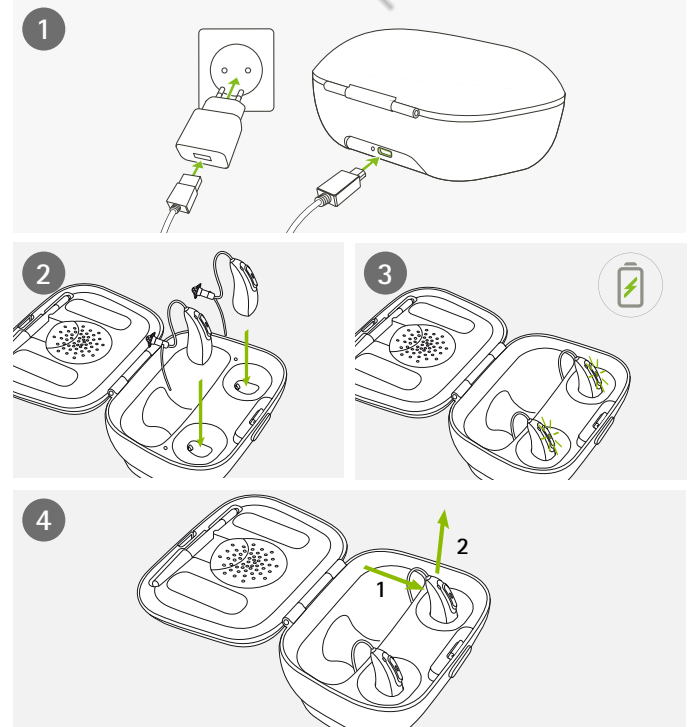

За более подробными инструкциями обратитесь к руководству пользователя слухового аппарата Phonak Audeo M-R

**PHONAK**  
life is on

A Sonova brand

Адрес предприятия, осуществляющего  
гарантийное обслуживание:  
000 «Сонова Рус»  
125009 Москва  
ул. Тверская, д. 12, стр. 9, офис 98  
Тел.: (495) 788 02 34

<b>ТАЛОН № 1 на гарантийное обслуживание</b>	<b>ТАЛОН № 2 на гарантийное обслуживание</b>
Зарядное устройство Phonak Charger Case Combi	Зарядное устройство Phonak Charger Case Combi
Серийный № _____	Серийный № _____
Дата проверки _____	Дата проверки _____
Изыт _____	Изыт _____
Представитель ремонтной организации _____	Представитель ремонтной организации _____
М.п. _____	М.п. _____

<b>Корешок талона №1</b>	<b>Корешок талона №2</b>
на гарантийное обслуживание	на гарантийное обслуживание
Зарядное устройство	Зарядное устройство
Phonak Charger Case Combi	Phonak Charger Case Combi
Серийный № _____	Серийный № _____
Дата проверки _____	Дата проверки _____
Изыт _____	Изыт _____
Представитель ремонтной организации _____	Представитель ремонтной организации _____
М.п. _____	М.п. _____

Свидетельство о приеме и продаже  
Зарядное устройство Phonak Charger Case Combi (Phonak)  
признано годным для эксплуатации.  
Устройство Phonak Charger Case Combi сертифицировано.  
Дата продажи \_\_\_\_\_ М.п. \_\_\_\_\_  
Специалист по слухопротезированию (печатать/подпись): \_\_\_\_\_ М.п. \_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

### Гарантийное обслуживание устройств Phonak, приобретенных в России

Гарантийное обслуживание устройства Phonak Charger Case Combi осуществляет компания ООО «Сонова Рус». ООО «Сонова Рус» несёт гарантийные обязательства только в отношении устройств, приобретенных на территории Российской Федерации у официальных дистрибьюторов, с отметкой продавца в гарантийном талоне. Средний срок службы устройства Phonak Charger Case Combi пять лет.

Бесплатное гарантийное обслуживание устройства Phonak Charger Case Combi осуществляется в течение одного года со дня продажи при:

- наличии даты продажи, печати и подписи представителя предприятия-изготовителя или торгующей организации в данном руководстве и гарантийном талоне;
- предъявлении изделия в чистом виде.

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в гарантийном талоне гарантийные обязательства на устройство Phonak Charger Case Combi вступают в силу с даты производства.

### Ограничения гарантии

Гарантия не покрывает ущерб, возникший в результате неправильного обращения или ухода за устройством, воздействия химических веществ, высоких температур или механических повреждений, а также при попадании инородных предметов и жидкостей. Ущерб, причиненный третьими лицами или неуполномоченными сервисными

центрами, а также использование товара не по назначению делает гарантию недействительной. Ограниченная гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов устройства, но не принадлежностей и расходных материалов к нему, таких как батарейки (иные элементы питания), трубочки, вкладыши, выносные ресиверы, рожки, защитные фильтры, в. т. ч. интегрированные в корпус и сами корпуса и т.п. Гарантийные обязательства вступают в силу только при подтверждении факта покупки.

Необходимо обеспечивать проведение технического обслуживания товара, предусмотренного техническими характеристиками товара. Несвоевременная чистка загрязненных и замена изношенных расходных материалов устройства является ненадлежащим техническим обслуживанием товара и может негативно сказаться на качестве работы устройства или вызывать его поломку. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи поломки товара из-за небрежного обращения с товаром, несоблюдения правил транспортировки, хранения, подключения, эксплуатации и технического обслуживания товара в соответствии с требованиями Sonova AG и техническими характеристиками товара, изложенными в руководстве по эксплуатации (при его наличии).

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства Phonak Charger Case Combi:

- при обнаружении механических повреждений товара, следов воздействия агрессивных сред и высоких температур, а также попадания инородных предметов и жидкостей;
- при использовании товара не по назначению;
- при несоблюдении правил транспортировки, хранения, подключения, эксплуатации и технического обслуживания товара в соответствии с требованиями изготовителя и техническими характеристиками товара, изложенными в руководстве по эксплуатации;
- если дефект возник ввиду небрежного обращения с товаром;
- если дефект возник из-за нормального износа товара;
- если сбой в работе возник в результате форс мажорных обстоятельств.

### В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Данная гарантия не включает предоставление каких-либо услуг специалистом сурдологом в его офисе.

### Международная гарантия

В отношении устройств Phonak Charger Case Combi, приобретенных на территории иных стран (помимо Российской Федерации), компания Sonova AG (бренд Phonak) предоставляет один год ограниченной международной гарантии, действующей со дня покупки с учетом вышеуказанных ограничений гарантии. Международную гарантию обеспечивает производитель Sonova AG. Международная гарантия не затрагивает каких-либо юридических прав, которые могут возникать в соответствии с применимым национальным законодательством, регулирующим продажу потребительских товаров.



Производитель: Сонова АГ

Лаубисрютиштрассе 28, CH-8712 Штэфа, Швейцария

www.phonak.ru