


Phonak

Fast Fact

Installation av Roger™ på distans

Roger kan enkelt installeras på distans utan ett personligt besök på kliniken. Oavsett vilken hörapparat användaren har kan du alltid hitta en lämplig Roger-mottagare, välj mellan:

- Marvel hörapparater med RogerDirect™
- Roger X
- Roger MyLink.

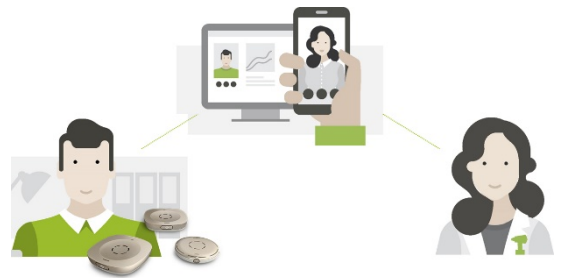

Nu kan du också utföra installationen av Roger i Marvel hörapparater på distans, utan att träffa klienten ansikte mot ansikte.

Användare som har en streamer

1. Audionomen parkopplar Roger X med en Roger-mikrofon. Roger X måste användas tillsammans med en annan enhet vid parkoppling. Placera Roger X i MLx-checkern eller streamern och parkoppla Roger X med Roger-mikrofonen.
2. När klienten har fått paketet levererat förklarar audionomen hur streamern ska användas under ett online-möte. Detaljerad information om hur olika streamers hanterar indata från Roger, se bruksanvisningen för den streamer som används.
3. Instruera användaren hur mikrofonen och streamern ska användas.
4. Det fungerar!

Användare med hörapparat med t-spole

1. Audionomen parkopplar Roger MyLink med Roger-mikrofonerna och skickar dem till klienten.
2. När klienten har fått paketet levererat förklarar audionomen hur man växlar till hörapparatens t-spoleprogram under ett online-möte.
3. Instruera användaren hur mikrofonen används i olika situationer och lägen.
4. Det fungerar!

Användare med Marvel hörapparater

Det går även att installera Roger i en Marvel hörapparat under en online-session, via en Roger iN-mikrofon och ett stiftverktyg eller Roger X och Roger Installer.

Roger-mottagarfunktion ska installeras i hörapparaten av en audionom eller annan personal som fått utbildning i detta. Därför kan endast audionomer eller personal som utbildats göra det möjligt för slutanvändaren att utföra en installation på distans genom ett online-möte.

Audionomen eller personal som utbildats behöver ha en fastställd och dokumenterad process för hur de på distans ska instruera sina klienter att installera Roger-mottagaren och hur de ska använda sina Roger-mikrofoner.