

Använda Roger™ DigiMaster X

Lathund

roger

Perfekt för klassrum med andra högtalarsystem för att säkerställa att alla som lyssnar kan höra med Roger kvalitet. Det är bara att ansluta, slå på och börja undervisa.








Första installation

- Anslut Roger DigiMaster X till en strömkälla.
- Använd den medföljande ljudkabeln och adaptern för att ansluta Roger DigiMaster X till ljudutjämningsystemet.
- Håll Roger Touchscreen Mic eller Roger inspiro inom 10 cm från Roger DigiMaster X och tryck på **Anslut**.

Daglig användning

- Tryck och håll in på/av-knappen på Roger DigiMaster X i två sekunder för att slå på strömmen. Slå på Roger-mikrofonen. Tala in i Roger-mikrofonen.
- Tryck och håll in på/av-knappen på Roger DigiMaster X i två sekunder för att stänga av strömmen när du är färdig.

Indikatorljus för Roger DigiMaster X

-  Fast rött sken – Roger DigiMaster X är avstängd
-  Fast blått sken – Standarddriftsläge
-  Blinkande blått sken – Roger-mikrofonen är avstängd eller utom räckvidd
-  Fast grönt sken – Roger-mikrofonen är i tyst läge
-  Grönt till rött sken – Volymen justeras +/-
-  Blinkande gult sken – Programvaruuppdatering
-  Blinkande rött sken – Kontakta teknisk support för Roger

