

# Använda Roger™ Multimedia Hub i klassrummet

Lathund

roger



I ett modernt klassrum använder läraren ofta video- och ljudkällor, till exempel interaktiva whiteboards eller mp3-spelare, under lektionerna. Barnen kan förväntas lyssna på individuella lektioner, till exempel en ljudbok eller en datoruppgift. Roger Multimedia Hub kan nu användas för både blandad lyssning (lärare plus ljudkälla) och enskild lyssning.

## Allmän användning

- Slå på enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av Roger Multimedia Hub i tre sekunder. De gröna indikatorljusen blinkar tills enheten har startats helt. Strömindikatorljuset tonar in och ut med ett grönt sken under användning.
- Slå av enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av Roger Multimedia Hub i tre sekunder. Indikatorljusen blinkar grönt tre gånger och slocknar sedan.
- Under laddning, antingen via en USB-sladd eller via Roger Charging Rack, blinkar indikatorljusen grönt och lyser sedan med ett fast grönt sken när laddningen har slutförts.



**Klassrumssändning** – används när alla Roger-användare behöver höra ljudkällan.

- Slå på Roger Multimedia Hub.
- Placera Roger Touchscreen Mic inom 10 cm från Multimedia Hub och tryck på ikonen **Anslut** på Touchscreen Mic.
- Anslut Multimedia Hub till audioutgången på datorn eller annan ljudkälla.
- Roger Multimedia Hub sänder ut ljudkällans ljud tillsammans med ljudet från Roger Touchscreen Mic. Både läraren och ljudkällan hörs samtidigt.

**Enskild lyssning** – används när ett barn behöver lyssna på en ljudkälla enskilt, t.ex. en ljudbok eller en datorövning.

- Håll Roger Multimedia Hub inom 10 cm från elevens Roger-mottagare och tryck på den stora knappen **Anslut** på Multimedia Hub. Upprepa anslutningen för ytterligare mottagare.
- Anslut Multimedia Hub till audioutgången på surfplattan eller annan ljudkälla.
- Sätt igång ljudkällan. Roger Multimedia Hub kommer endast att sända ljudet till de anslutna mottagarna.
- Om eleven behöver återansluta till klassrumsnätverket kan han eller hon göra det via Roger WallPilot eller lärarens mikrofon.