

Använda Roger™ Touchscreen Mic och Roger™-mottagare

Lathund

roger



Roger Touchscreen Mic är enkel och intuitiv att använda i klassrummet och gör det möjligt för både lärare och elever att enkelt veta när mikrofonen är på och sänder.

Mikrofon



Roger Touchscreen Mic

Slå på enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av mikrofonen i tre sekunder. De gröna indikatorljusen blinkar under uppstarten.

- Häng Roger Touchscreen Mic om halsen på läraren och justera längden på halsbandet tills mikrofonens överkant är 20 cm från munnen.
- Om en elev behöver ansluta sig placerar du Roger Touchscreen Mic inom 10 cm från Roger-mottagaren och trycker på **Anslut**-ikonen. Upprepa med mottagaren på andra örat.
- Roger Touchscreen Mic kan sättas i tyst läge genom att man trycker på Mute-knappen. Indikatorljuset runt knappen blinkar nu rött.
- När dagen är slut slår du av Roger Touchscreen Mic genom att hålla in på/av-knappen i tre sekunder. Bekräfta att du vill stänga av mikrofonen genom att klicka på Ja. Ladda dagligen med rätt USB-laddare eller genom att placera mikrofonen i Roger Charging Rack.

Mottagare



Roger X

- Anslut Roger X på hörapparaten med hjälp av lämplig audiosko. Nu är den klar att användas.
- När mottagarna en gång har anslutits till Roger-nätverket behöver de inte återanslutas.
- Om mottagaren måste lämnas kvar i skolan ska du ta bort Roger X från hörapparaten vid skoldagens slut, enligt anvisningar från din audionom.



Designintegrerad Roger-mottagare

- Designintegrerade Roger-mottagare är skräddarsydda för särskilda hörapparater och cochleaimplantat.
- När mottagarna en gång har anslutits till Roger-nätverket behöver de inte återanslutas, även när man har slagit av och på dem igen.
- Det bör inte vara nödvändigt att ta loss designintegrerade mottagare i skolan.