

Skapa ett Roger MultiTalker-nätverk

Lathund

roger



Flera mikrofoner kan användas i samma Roger-nätverk, vilket gör det möjligt för flera lärare, elever och ljudenheter att sända till Roger-lyssnare. Nedan följer olika sätt att skapa eller gå med i ett MultiTalker-nätverk (MTN). MTN-anslutningar upprätthålls ständigt, även när mikrofonerna är avstängda.

Lägg till Roger-mikrofoner/AudioHub/DigiMaster via Anslut

1. Placera den primära Roger inspiro-enheten inom 10 cm avstånd från en Roger-mikrofon eller Roger AudioHub och tryck på **Anslut**. Roger inspiro bekräftar anslutningen via LCD-skärmen.
2. Gör om samma med alla andra Roger-enheter.



Lägg till Roger-mikrofoner med Roger WallPilot

1. Placera Roger-mikrofonen inom 10 cm avstånd från en Roger WallPilot.
2. Slå först på mikrofonen och stäng därefter av den.
3. Mikrofonen är nu ansluten till klassrumsnätverket.



Lägg till Roger inspiro via JoinNet (Gå med i nätverk)

1. Placera Roger inspiro inom 10 cm avstånd från en Roger-enhet.
2. Tryck på skärmknappen **JoinNet/Gå med i nätverk**.
3. Roger inspiro är nu ansluten till klassrumsnätverket.

