

# Använda Roger för en privat konversation

Lathund

roger



Om du är den enda läraren i ett klassrum och du behöver tala enskilt med barnet som använder en Roger-mottagare, utan att andra elever hör, kan du snabbt skapa ett nytt nätverk för att tala med barnet. Det kan vara särskilt användbart när klassrumsnätverket har ett ljudförstärkningsystem.

## Skapa ett nytt nätverk om du vill koppla bort din mikrofon från andra elever och bara sända till vissa barn.

1. Tryck på **OK**-knappen på Roger inspiro.
2. Bläddra tills **Nätverk** markeras. Tryck på **OK**.
3. Bläddra tills **Skapa Nytt nätverk** markeras. Tryck på **OK**.
4. Håll Roger inspiro 10 cm från barnets Roger-mottagare och tryck på **Anslut**.
5. Gör om med övriga mottagare som du vill ansluta till det nya nätverket.

## Återgå till klassrumsnätverket

1. Tryck på **OK**-knappen.
2. Bläddra tills **Nätverk** markeras. Tryck på **OK**.
3. Håll Roger inspiro 10 cm från Digimaster-högtalarens ovansida eller en mottagare som tillhör ett barn som inte tillhör det nya nätverket.
4. Bläddra tills **JoinNet/Gå med i nätverk** markeras. Tryck på **OK**. Roger inspiro ger anvisningar för följande steg när du går med i nätverket.
5. Återanslut barnen som befann sig i privata samtal med klassrumsnätverket genom att hålla Roger inspiro nära barnets mottagare och trycka på **Anslut**. Gör om samma för samtliga mottagare som deltog i det privata samtalet.
6. Barn som befann sig i ett tillfälligt nätverk kan även **ansluta** genom att gå inom 1-3 m avstånd från Roger Wallpilot, om en sådan är installerad i klassrummet.