

Använda Roger inspiro och Roger X

Lathund

roger



Förnamn: _____

Efternamn _____

Skola: _____

Lärare: _____


Rogerkontakt: _____

Telefonnummer: _____

Datum: _____

Mikrofon: Roger inspiro

Bruksanvisning

1. För att slå PÅ för du skjutlisten åt vänster tills den gröna markeringen blir synlig och skärmen börjar lysa.
2. Fäst mikrofonen inom 20 cm från munnen.
Eller häng bommikrofonen på ett lämpligt sätt på örat, med mikrofonen framför munnen.
3. Behöver eleven ansluta sig? Håll i så fall sändaren inom 10 cm från en Roger X-mottagare. Tryck på den högra **Anslutnings**-skärmmknappen. Gör samma sak på andra sidan om apparaten är binaural.
4. Lås Roger inspiros knappar genom att trycka på , och sedan **OK**. En nyckelsymbol visas i statusfältet.
5. Stäng av Roger inspiro varje dag genom att föra den övre skjutlisten till höger och ansluta mini-USB-kontakten på laddningsenheten till Roger inspiro.

Serienummer: _____



Hörtelefon: Roger X

Bruksanvisning

1. Sätt Roger X på hörapparaten med hjälp av en lämplig audiosko. Nu är den klar att användas.
2. Ta bort audioskon och Roger X från hörapparaten vid skoldagens slut om mottagaren måste bli kvar i skolan.

Serienummer

Höger: _____ Vänster: _____

