

# Skapa ett litet gruppnetwork med Roger


Lathund

roger

Det är enkelt att skapa ett tillfälligt andra nätverk med hjälp av Roger-funktionen SubNet (underordnat nätverk), om du behöver prata med en liten grupp barn medan en annan lärare fortsätter att prata på klassrummets huvudnätverk. Det krävs ingen frekvensplanering och det är enkelt för både dig och den mindre barngruppen att ansluta till huvudnätverket (EndSub) när ni är färdiga.

## Konfigurering

Tilldela SubNet/EndSub-funktionen till den vänstra skärmen i Roger inspiro (detta behöver bara göras en gång):

1. Tryck på **OK**.
2. Bläddra ner till **Inställningar**, tryck på **OK**.
3. Om **Konfig. skärmen** markeras: tryck på **OK**.
4. Om **Vänster skärmknapp** markeras: tryck på **OK**.
5. Bläddra ner till **SubNet/EndSub** och tryck på **OK**.
6. Tryck på -knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn.

## Använd

### Skapa SubNet

1. Tryck på **SubNet**-skärmen. Vänster skärmen visar nu **EndSub**.
2. Håll Roger inspiro närmare än 10 cm från mottagaren och tryck på **Anslut**.

### EndSub

1. Tryck på **SubNet**-skärmen.
2. Håll Roger inspiro närmare än 10 cm från mottagaren och tryck på **Anslut**. Gör om samma för alla mottagare som befann sig i SubNet.

