

Använda Roger Pen


Lathund

roger

Roger Pen har utformats för att vara diskret och har smidig trådlös överföring, helautomatiska inställningar, Bluetooth med bredbandsaudio för användning med mobiltelefon, TV-anslutning och en audioingång för att lyssna på multimediaenheter.

Daglig användning av Roger Pen

1. Ladda Roger Pen i dockningsstationen eller med mini-USB-sladden. Ladda i 2 timmar för maximal laddning.
2. Slå på mikrofonen genom att trycka ner  -knappen i 2 sekunder tills indikatorlampan lyser med vitt sken.
3. Bilderna till höger visar hur Roger Pen bör användas i olika situationer.
4. Ladda Roger Pen dagligen efter bruk.

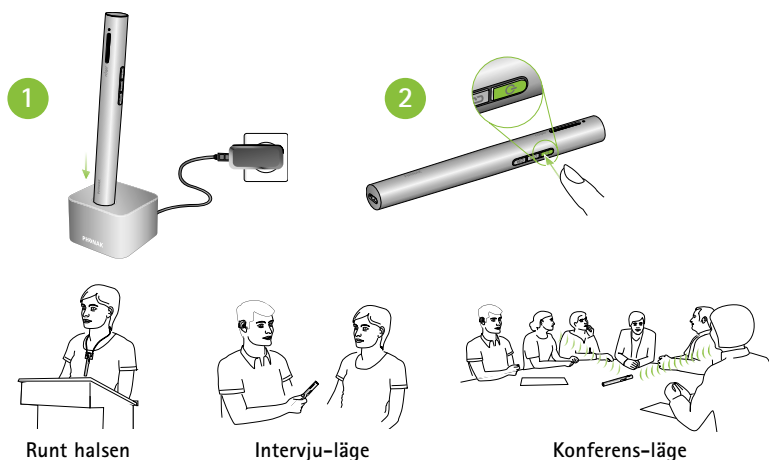

Använda Roger Pen med mobiltelefoner och multimediaenheter med Bluetooth

1. Efter att Roger Pen har parkopplats och anslutits till en telefon med Bluetooth (se bruksanvisningen till Roger Pen) kan den användas för telefonsamtal.
 - Ta emot ett samtal genom att trycka på  -knappen på Roger Pen. Tala in i Roger Pen-mikrofonen.
 - Avsluta samtalet genom att trycka på  -knappen.
 - Ring ett samtal genom att slå numret på mobiltelefonen. Du kommer att höra uppringnings-tonen och samtalet genom dina hörapparater.
2. Anslut din Roger Pen till en multimediaenhet enligt något av de följande tillvägagångssätten innan du slår på multimediaenheten.
 - a) Anslut dockningsstationen till ljudenheten och sätt in Roger Pen.
 - b) Anslut Roger Pen med hjälp av micro-USB-kabeln.

