

Använda flera Roger-mikrofoner


Lathund

roger

En person som använder Roger kan behöva lyssna på flera talare samtidigt och det kan vara opraktiskt eller omöjligt att dela en mikrofon. Roger Pen och Roger Clip-On Mics kan anslutas för att skapa ett nätverk med flera mikrofoner. När en mikrofon har anslutits kan användarens röst sändas direkt till lyssnaren. Du hör endast en person i taget men de andra personerna kan prata när talaren gör en paus. Allt detta kan göras utan att mikrofonen behöver skickas runt.

Lägga till ytterligare Roger-mikrofoner

1. Extra mikrofoner måste anslutas en i taget.
2. Slå på båda mikrofonerna.
3. Bestäm vilken Roger-mikrofon som ska vara den primära enheten.
4. Håll båda mikrofonerna intill varandra (inom 10 cm avstånd).
5. Tryck och håll ner -knappen på den primära mikrofonen.
6. Båda mikrofonerna visar ett grönt bekräftelseljus.
7. Båda mikrofonerna kan skicka ljud till den anslutna Roger-lyssnaren.

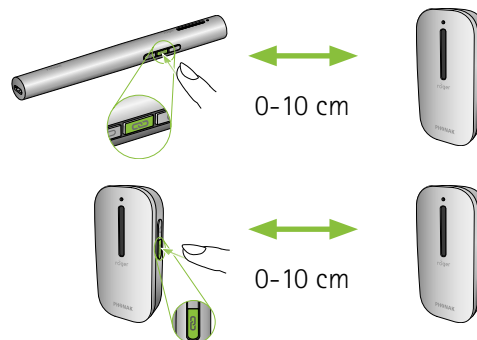

Överväganden när Roger Pen används som primärmikrofon

- När sekundära mikrofoner har anslutits till Roger Pen kan de endast användas tillsammans med Roger Pen. Om du vill bryta anslutningen kan du använda mikrofonens NewNet-funktion (se instruktioner i bruksanvisningen).
- Det går att ansluta upp till 9 Roger Pen och/eller Clip-On Mic-mikrofoner till din Roger Pen.

Överväganden när Roger Clip-On Mic används som primärmikrofon

- Markera den primära Roger Clip-On Mic-enheten med stjärnklistermärket, så att du kommer ihåg vilken mikrofon som är vilken.
- När sekundära mikrofoner har anslutits till Roger Clip-On Mic kan de endast användas tillsammans med den primära Roger Clip On Mic. Om du vill bryta anslutningen kan du använda mikrofonens NewNet-funktion (se instruktioner i bruksanvisningen).
- Vi rekommenderar att du använder Roger Pen som primärenhet när du ansluter till en Roger Pen.

Indikatorlampa

Innebär



Anslutningen har genomförts – den andra Roger-mikrofonen har anslutits till den primära Roger-mikrofonen.



Den primära Roger-mikrofonen kunde inte hitta en annan Roger-mikrofon. Flytta Roger-mikrofonerna närmare varandra och kontrollera att Roger-mikrofonen är påslagen. Försök därefter att ansluta på nytt.



Den andra Roger-mikrofonen är inte kompatibel med din primära Roger Clip-On Mic.