

Phonak Remote

Bruksanvisning



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Komma igång

Phonak Remote App är en app som har utvecklats av Phonak, ett världsledande företag när det gäller hörsellösningar och som har sin bas i Zürich i Schweiz.

Läs bruksanvisningen noga så att du kan utnyttja alla möjligheter som din hörapparat har att erbjuda.

Avsedd användning

Phonak Remote App används med Android- och Apple iOS-produkter¹ för att justera hörapparater från Phonak.



Information om kompatibilitet:

Trådlösa Phonak Audéo™ B-Direct hörapparater krävs för att använda Phonak Remote App.

Phonak Remote kan användas på telefoner med Bluetooth® Low Energy (BT-LE) och är kompatibel med iPhone 5s och senare telefoner med iOS Version 10.2 eller senare.

Phonak Remote kan användas med Android-enheter som har certifierats med Google Mobile Services med stöd för Bluetooth 4.2 och Android OS 6.0 och senare.



Vissa telefoner har skärmljud eller knappljud, som skulle kunna simulera en ljudöverföring till hörapparaten. Gå till inställningarna på din telefon, välj ljud och se till att alla skärmljud och knappljud stängs av.

¹ Kompatibla telefoner: Phonak Remote App kan endast användas med telefoner med stöd för Bluetooth® Low-Energy.

Bluetooth® varumärket och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Apple, Apple-logotypen, iPhone och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.




CE-märkt 2017

Innehåll

	Sidan
1. Appöversikt	4
2. Integritetspolicy	5
3. Parkoppling med Phonak Audéo™ B-Direct	6
4. Huvudskärm	7
5. Ställa in program	8
6. Ändra namn på program	9
7. Inställningar	10
8. Information om överensstämmelse	11
9. Information och symbolförklaring	12


1. Appöversikt

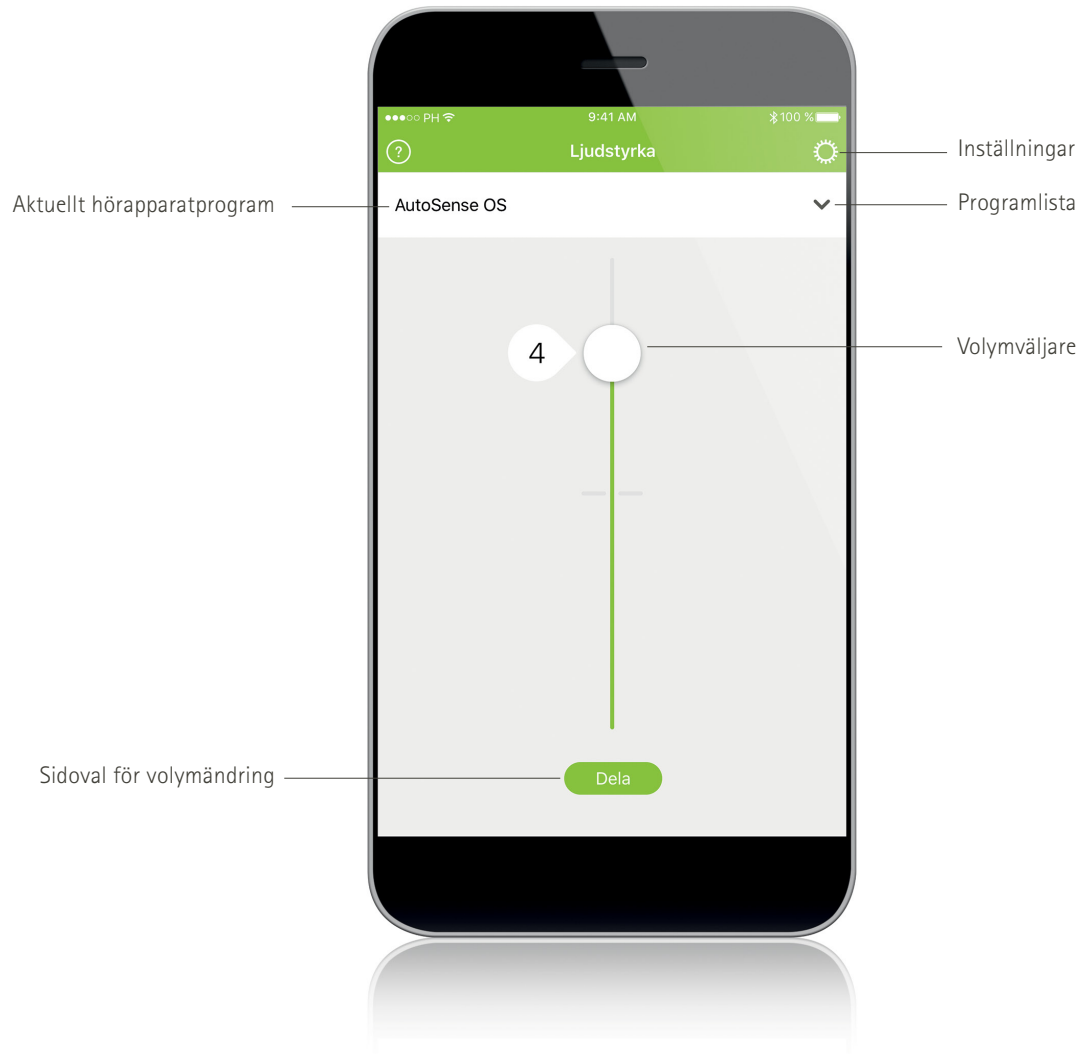

2. Integritetspolicy

Godkänna Användarvillkor

För att använda appen måste du godkänna Användarvillkoren och den anonyma dataanalysen av appens användning.

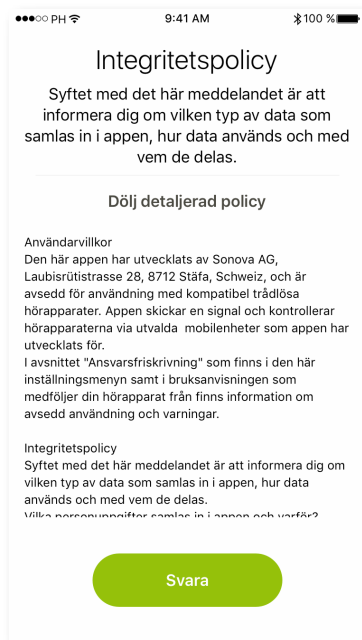

Du kan alltid välja demoläget för att prova appen utan anslutning av en Phonak hörselapparat och få ett första intryck av funktionerna. I det här läget finns inga fjärrkontrollfunktioner tillgängliga för dina hörselapparater.

3. Parkoppling med Phonak Audéo™ B-Direct hörapparat


A. Identifiera hörapparaten



i Öppna och stäng batteriluckan så att hörapparaterna befinner sig i parkopplingsläge innan du låter appen identifiera hörapparaterna. Håll enheterna inom högst 1 meters avstånd vid parkoppling.

B. Välj dina hörapparater

Välj enheten som identifierades av Remote App för att ansluta.

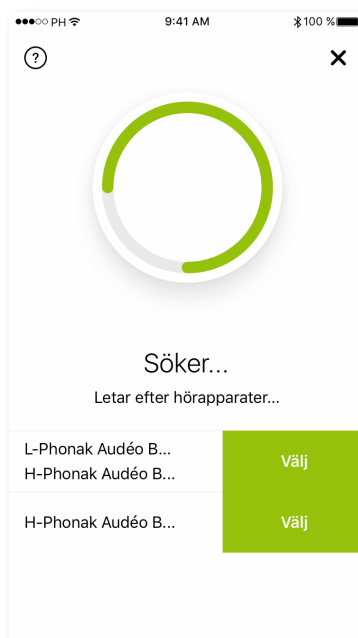


i Om appen har identifierat fler enheter ska du trycka på knappen på din hörapparat så kommer motsvarande enhet att markeras på appen.

4. Huvudskärm



Ändra hörapparatvolymen

Flytta skjutreglaget upp eller ner för att öka eller minska hörapparatvolymen på båda sidor.

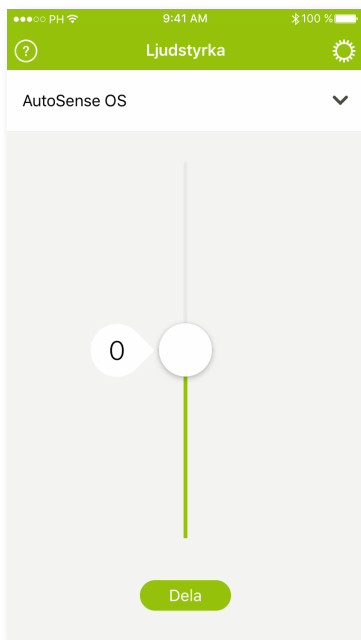

Ändra en sida i taget

Tryck på knappen "Dela" för att dela volymreglaget för att ändra varje sida separat.

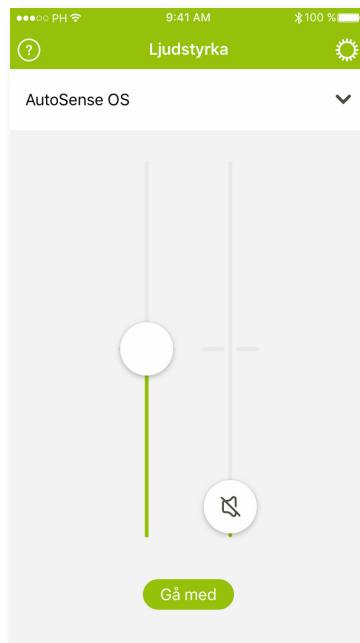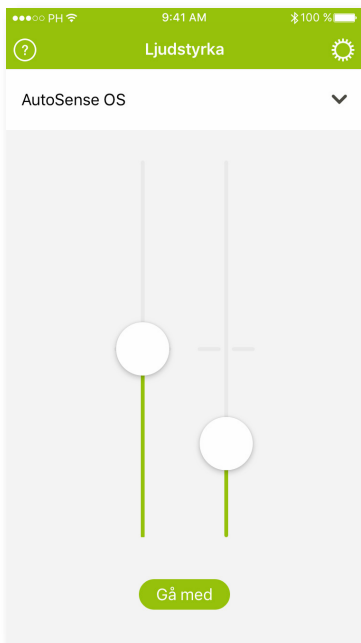


i Du kan dämpa hörapparaterna genom att dra volymreglaget hela vägen ner.

5. Ställa in program


A. Välj ett annat program

Tryck på fältet för att visa och välja tillgängliga program eller för att välja och lyssna på en ansluten ljudkälla (till exempel en TV).

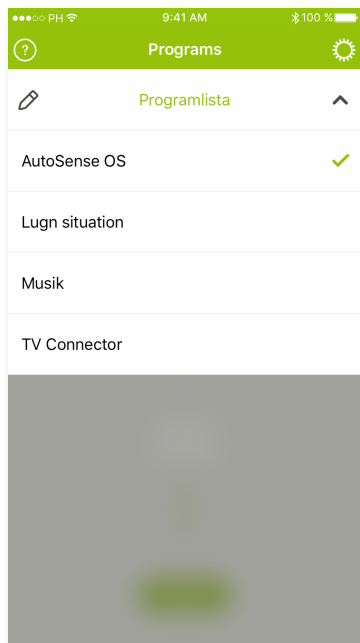


B. Avancerade programinställningar

Ytterligare justeringar finns tillgängliga beroende på hur din hörapparat är konfigurerad och vilka ljudkällor som är anslutna.

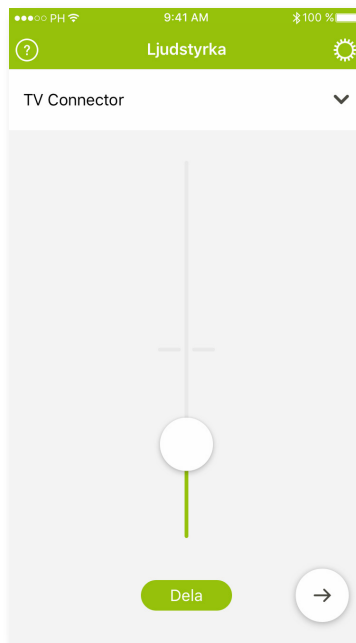


C. Omgivningsbalans

Om du har anslutit en extern ljudkälla till hörapparaterna kan du ställa in lyssningsfokus på den anslutna ljudkällan eller omgivningen med reglaget.

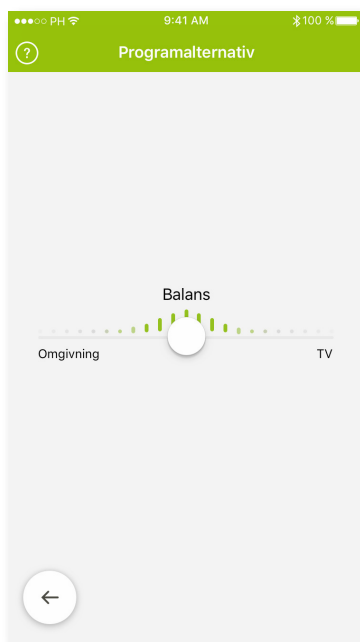

D. Tinnitusbrus


Justera volumen på Tinnitusbrus som skapas i hörapparaten.

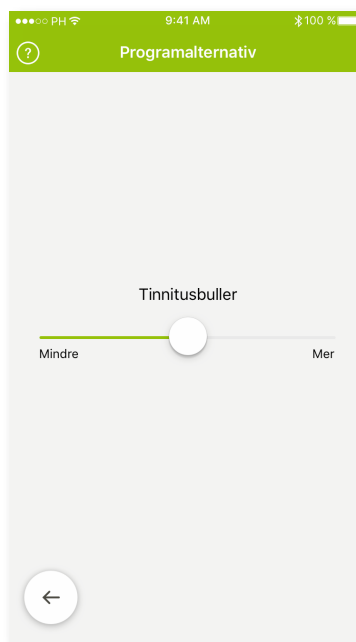

6. Ändra namn på programmen


A. Aktivera programredigering

Tryck på fältet för att visa programlistan och välj ikonen redigera.

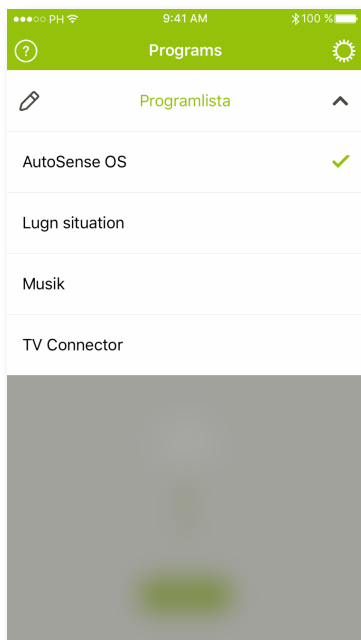


B. Välj programmet som ska redigeras

Välj vilket program du vill redigera.

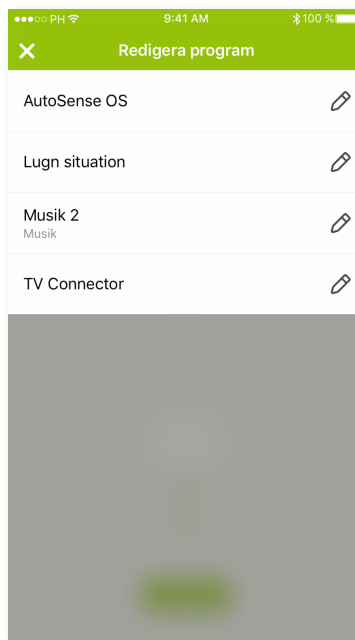

C. Ändra namn på det valda programmet

Skriv in ett namn på ett program.

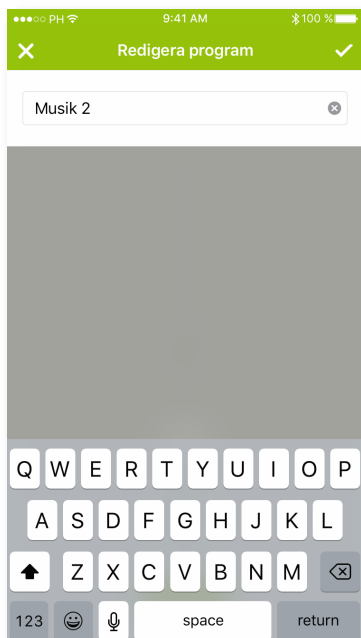


7. Menyn inställningar

Phonak Remote App finns tillgänglig på flera språk. Standardspråket för Phonak Remote App är samma som på den anslutna telefonen.


A. Ikonen inställningar

Tryck på ikonen "Inställningar" för mer support.

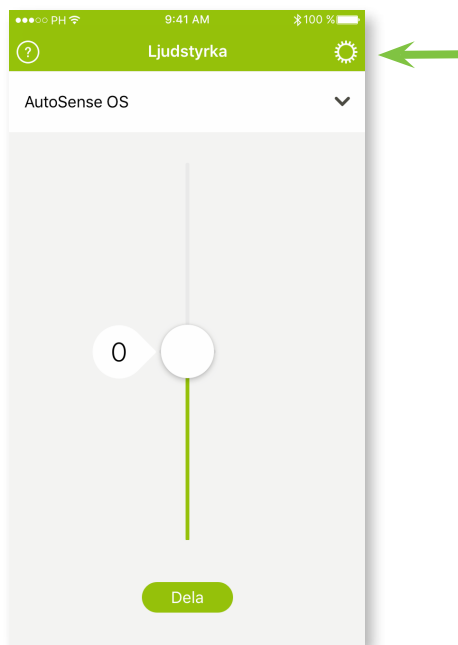


B. Appinställningar

Välj **Appinställningar** för att visa en separat meny för appens inställningar.

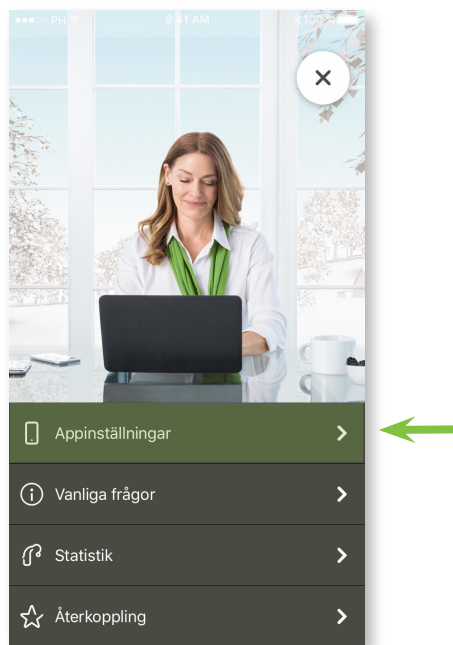


C. Vanliga frågor och svar

Välj **Vanliga frågor och svar** för att hitta fler svar i listan med vanliga frågor och svar.

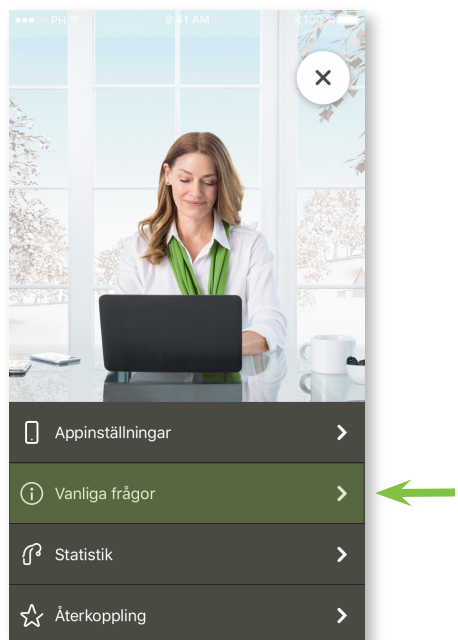

D. Användningstid

Visa genomsnittlig daglig användningstid för anslutna hörapparater.

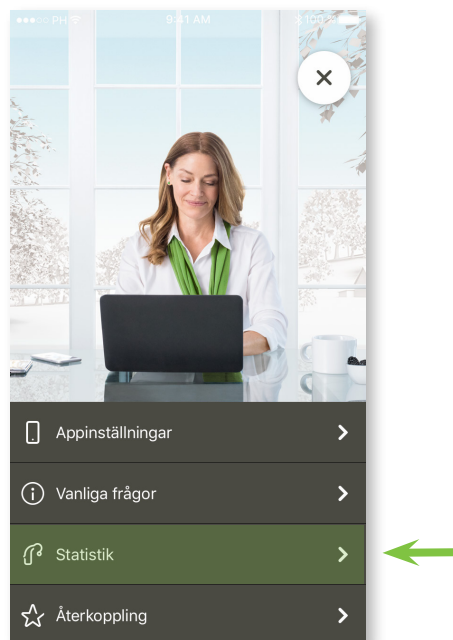

8. Information om överensstämmelse

Överensstämmelsedeklaration

Härmed intygar Sonova AG att denna Phonak-produkt är i enlighet med rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Den fullständiga texten i Överensstämmelsedeklarationen kan erhållas från tillverkaren, vars adress finns i listan på <http://www.phonak.se>.

i Om hörapparaterna inte svarar på kommandon från enheten på grund av fältstörningar måste du flytta dig bort från störningsfältet.

9. Symbolförklaring



Med CE-märket bekräftar Sovova AG att denna Phonak-produkt uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-märkt 2017.



Denna symbol anger att det är viktigt att användaren läser och följer relevant information som finns i denna bruksanvisning.



Viktig information för hantering och produktsäkerhet.



Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren iakttar relevanta varningsmeddelanden som finns i den här bruksanvisningen.



Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Phonak sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa Schweiz
www.phonak.se

